

TRI-BALL® Flow-orientierter Atemtrainer



Die Atemtherapie mit **TRI-BALL®** eignet sich besonders nach bronchopulmonalen Eingriffen im Thorax und Oberbauch.

Durch eine oberflächliche Atmung kommt es zu einer ungenügenden Durchlüftung der tiefer gelegenen Lungenbezirke. Speziell nach Eingriffen im Thoraxbereich und bei älteren oder bettlägerigen Patienten, sammeln sich als Folge Sekrete, insbesondere Schleim, in den unteren Bereichen der Lunge an. Hierdurch wird eine Infektion des Lungengewebes begünstigt. Tägliches Üben mit dem Atemtrainer beugt einer Infektion vor.

TRI-BALL® Anwendung: Der Patient versucht durch langsames, tiefes Einatmen die Kugeln in der ersten und zweiten Kammer anzuheben und in der Schwebelage zu halten. Die dritte Kugel soll nicht angehoben werden, um einen zu hohen Inspirationsflow zu vermeiden.

TRI-BALL® ist eine handliche, ökonomische und hygienische Option zur Atemtherapie und genießt bei Patienten hohe Akzeptanz.

TRI-BALL® Produktvorteile

- Ein-Patienten-Anwendung reduziert das Risiko von Kreuzreaktionen.
- Grobpartikel-Sieb verhindert Fremdkörper-Aspiration.
- Mundstück Ablage zur verbesserten Hygiene.
- Breites Flow-Spektrum 600/900/1200ml/Sekunde.
- Drei farbcodierte Bälle trainieren den optimalen Inspirations-Flow.

Bestellinformation:



| Ausführung | VE | Artikel-Nr. |
|---|-------------------|------------------|
| TRI-BALL® Atemtrainer flow-orientiert zum Einmalgebrauch | 144 (12 x 12) | 259-12000 |